



## Urządzenie do Zamykania Dostępu Naczyniowego


*Angio-Seal jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania w celu zamknięcia miejsca nakłucia tętnicy udowej i skrócenia czasu do uzyskania hemostazy u pacjentów, którzy zostali poddani diagnostycznym procedurom angiograficznym lub procedurom interwencyjnym (minimalna średnica tętnicy 4mm). Hemostazę uzyskuje się głównie poprzez mechaniczne, szczelne zamknięcie miejsca arteriotomii (od wewnątrz przez kotwice, od zewnątrz przez kolagen). Urządzenie Angio-Seal o rozmiarze 6 F służy do zamykania miejsca nakłucia po użyciu koszulki naczyniowej o rozmiarze 6 F lub 5 F, natomiast urządzenie Angio-Seal o rozmiarze 8 F służy do zamykania miejsca nakłucia po użyciu koszulki naczyniowej o rozmiarze 8 F lub 7 F*

### Cechy produktu

- Koszulka wprowadzająca
- Lokalizator miejsca arteriotomii
- Prowadnik z elementem prostującym końcówkę typu „J” o rozmiarze 6F (2,0 mm) - 0,035 cala (0,89 mm) lub prowadnik z elementem prostującym końcówkę typu „J” o rozmiarze 8F (2,7 mm) - 0,038 cala (0,96 mm)
- Angio-Seal składa się z 3 biowchłaniających elementów składowych: kotwicy, kolagenu i nici
- Wszystkie komponenty ulegają wchłonięciu w ciągu 60-90 dni.
- 10 szt. w opakowaniu
- Jednorazowego użytku, okres przydatności do użycia jeden rok od sterylizacji
- Sterylizowany promieniami gamma. Nie sterylizować ponownie
- Dostępny na wybranych rynkach

### Przechowywanie, pakowanie i usuwanie:

- Należy przechowywać w chłodnym miejscu (temperatura od 15°C do 25 °C)
- Zwiera materiały resorbowalne, które ulegają degradacji pod wpływem ekspozycji na ciepło i wilgoć, toteż urządzenia nie można sterylizować ponownie
- Sterylne i niepirogenne, jeśli znajduje się w nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu
- Zanieczyszczone egzemplarze, elementy składowe i materiały opakowaniowe usuwać zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w szpitalu i standardowymi środkami ostrożności mającymi zastosowanie wobec odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne

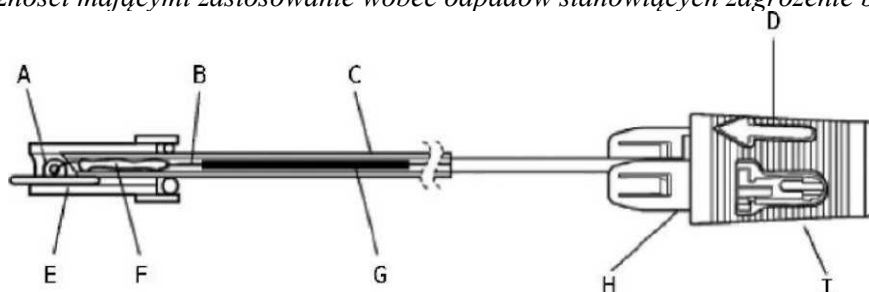

A Kotwica  
 B Nić  
 C Rurka wprowadzająca  
 D Wskaźnik referencyjny  
 E Rurka umożliwiająca przejście  
*Specyfikacja produktów*

F Hemostatyczna gąbka kolagenowa  
 G Rurka uszczelniająca  
 H Osłona urządzenia  
 I Koreczonek urządzenia

Rozmiar	Średnica prowadnika	Kod
6 F	0,035 cala	610132
8 F	0,038 cala	610133

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt.

Podczas składania zamówienia, prosimy podawać powyższe numery katalogowe produktów