

Weck

System klipsów naczyniowych Horizon



System Horizon: Zaprojektowany dla Twoich potrzeb

Klipsy i klipsownice systemu Horizon zaprojektowano by spełniać potrzeby chirurgów, pielęgniarek instrumentujących i całego zespołu operacyjnego.



KLIPS – Funkcjonalna doskonałość

- Klinowaty kształt klipsów Horizon zamyka tkankę z dużą precyzją od końcówki klipsa wstecznie
- Sercowaty przekrój klipsa zaprojektowano dla pewnego uchwytu tkanki naczynia przez każdy klips.
- Poprzeczne rowki wewnętrzne zapobiegają zsunięciu się klipsa z naczynia.
- Wewnętrzny wzdłużny rowek klipsów Horizon dodatkowo zmniejsza ryzyko nożycowania klipsów.
- Zbliżony do trójkąta przekrój poprzeczny klipsów Horizon maksymalizuje powierzchnię kontaktu klipsa i klipsownicy co praktycznie eliminuje ryzyko wypadania klipsów.

□ Micro ■ Small ■ Small/Wide ■ Medium ■ Medium/Large ■ Large



MAGAZYNEK

Łatwe ładowanie z wygodą przyczepności

- Magazynek z klipsem Horizon zapewnia niezwykle łatwe i precyzyjne ładowanie, które może poprawić wydajność procedury chirurgicznej.
- Boczne sprężynki ograniczające zaciski w magazynku są przesuwane przez szczęki aplikatora podczas ładowania klipsa.
- Przesunięcie sprężynki uwalnia zacisk, zapewniając niemal beztarciowe załadowanie jedną ręką.
- Klipsy są wyśrodkowane w gniazdach magazynków, co zapewnia precyzyjne ładowanie.
- Magazynki klipsów są oznaczone kolorami, aby pasowały do aplikatorów.
- Dostępne są zarówno wkłady 6- jak i 24-klipsowe.
- Specjalny samoprzylepny spód magazynku Horizon pozwala użytkownikowi na wygodną zmianę miejsca ładowania klipsa – przymocowanie na dowolny sterylny obszar.

KLIPSOWNICA

Wydajność i łatwość czyszczenia

- Endoskopowy aplikator Horizon zapewnia specjalnie zaprojektowane zamknięcie klipsa aby dać chirurgom pewne wrażenia dotykowe.
- Duże, lekkie pokrętko obrotowe pozwala na obsługę jednym palcem, obrót aplikatora o 360°.
- Endoskopowe aplikatory Horizon są dostępne dla średnich, średnio dużych i dużych klipsów Horizon oraz wyposażone w porty do płukania, zapewniające dokładne czyszczenie.
- Aplikatory wielokrotnego użytku zostały zaprojektowane specjalnie do użytku z klipsami naczyniowymi Horizon, co znacznie obniżyło koszty w porównaniu do jednorazowych automatycznych aplikatorów klipsów.
- Wszystkie aplikatory przeznaczone do zabiegów na otwarto Horizon otwierają się szeroko w celu łatwego i dokładnego czyszczenia.
- Dostępne aplikatory do zabiegów na otwarto z zakrzywionymi oraz zagiętymi branszami.



TITANIUM LIGATING CLIPS

WECK

REF.		CLIP SIZE	CLIPS/CARTRIDGE	CARTRIDGES/BOX	CLIPS/BOX
005200		Microclip	6	30	180
001200		Small	6	30	180
001204		Small	24	25	600
001201		Small-Wide	6	30	180
001205		Small-Wide	24	25	600
002200		Medium	6	30	180
002204		Medium	24	25	600
003200		Medium-Large	6	20	120
003204		Medium-Large	24	15	360
004200		Large	6	20	120
004204		Large	24	15	360

OPEN SURGICAL LIGATING APPLIERS

WECK

REF.		APPLIER LENGTH		CLIP SIZE	JAW TYPE*
537061		6"	(15 cm)	Microclip	Curved
537081		8"	(20 cm)	Microclip	Curved
137061		6"	(15 cm)	Small	Curved
137081		8"	(20 cm)	Small	Curved
137085		8"	(20 cm)	Small	Angled
137111		11"	(28 cm)	Small	Curved
137062		6"	(15 cm)	Small-Wide	Curved
137082		8"	(20 cm)	Small-Wide	Curved
137086		8"	(20 cm)	Small-Wide	Angled
137112		11"	(28 cm)	Small-Wide	Curved
237061		6"	(15 cm)	Medium	Curved
237081		8"	(20 cm)	Medium	Curved
237085		8"	(20 cm)	Medium	Angled
237111		11"	(28 cm)	Medium	Curved
237115		11"	(28 cm)	Medium	Angled
237117		11"	(28 cm)	Medium	Right-Angled
337081		8"	(20 cm)	Medium-Large	Curved
337085		8"	(20 cm)	Medium-Large	Angled
337111		11"	(28 cm)	Medium-Large	Curved
337115		11"	(28 cm)	Medium-Large	Angled
437081		8"	(20 cm)	Large	Curved
437085		8"	(20 cm)	Large	Angled
437111		11"	(28 cm)	Large	Curved
437115		11"	(28 cm)	Large	Angled
437117		11"	(28cm)	Large	45° Angled

ENDOSCOPIC LIGATING APPLIERS

WECK

REF.		APPLIER LENGTH		DIAMETER	CLIP SIZE	JAW TYPE*
238110		11"	(28 cm)	10 mm	Medium	Endoscopic
238170		18"	(45 cm)	10 mm	Medium	Endoscopic
238200		13"	(32 cm)	5 mm Shaft, 7 mm Jaw	Medium	Endosaphenous
WK238110T		13"	(33 cm)	10 mm	Medium	Endoscopic take-apart
338110		11"	(28 cm)	10 mm	Medium-Large	Endoscopic
338170		18"	(45 cm)	10 mm	Medium-Large	Endoscopic
WK338110T		13"	(33 cm)	10 mm	Medium-Large	Endoscopic take-apart
438110		11"	(28 cm)	12 mm	Large	Endoscopic
438170		18"	(45 cm)	12 mm	Large	Endoscopic

SPECIALTY OPEN SURGICAL LIGATING APPLIERS

WECK

REF.		APPLIER LENGTH		DIAMETER	CLIP SIZE	JAW TYPE*
137117		11"	(28 cm)	Small-Wide	Multi-Angled	45° Angled
137118		11"	(28 cm)	Small-Wide	Multi-Angled	Curved

* Curved 20° Angled 55° Right-Angle 90°

□ Micro ■ Small ■ Small/Wide ■ Medium ■ Medium/Large ■ Large

Klips Micro




Najnowszy członek linii klipsów Horizon – do ligacji najmniejszych struktur

Specjalistyczne klipsownice wygięte




Klipsownica 28 cm Multi-Angle Access Applier dla klipsów małych (szeroki wlot) łączy zagięcie 45° lub zakrzywienie tradycyjne dla lepszej penetracji pola operacyjnego w trakcie zabiegu.

Widok przekroju klipsa i szczęk narzędzia

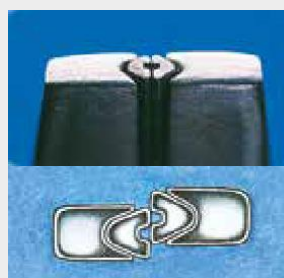

Przykład właściwego (u góry) i niewłaściwego (na dole) zwarcia szczęk klipsownicy.

Klipsownice Endoskopowe

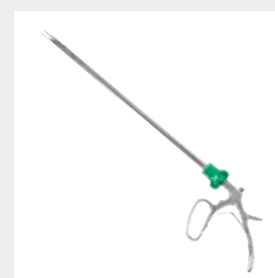

Klipsownice rozbieralne TAP – w pełni funkcjonalne, o wysokiej jakości wykonania narzędzie do codziennej pracy.

Teleflex Incorporated (NYSE: TFX) is a diversified global company, distinguished by a significant presence in healthcare, with niche businesses that also serve the aerospace and commercial markets.

Teleflex Medical is committed to partnering with healthcare providers in anaesthesiology, critical care, urology and surgery to provide solutions that help reduce infections and improve patient and provider safety. The company also produces surgical instruments and devices, cardiac devices and other specialty products for device manufacturers.

The Teleflex Medical family of brands includes ARROW®, BEERE®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD™, SSI™, TAUT®, TFX OEM® and WECK®.

Teleflex Medical global operations: Austria, Belgium, Canada, China, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Portugal, Singapore, Slovak Republic, South Africa, Spain, Switzerland, United Kingdom, Uruguay and USA.

YOUR CONTACTS FOR EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA):

TELEFLEX MEDICAL HEADQUARTER EMEA, IRELAND

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath
Phone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflexmedical.com

AUSTRIA +43 (0)1 402 47 72
BELGIUM +32 (0)2 333 24 60
CZECH REPUBLIC +420 (0)495 759 111
FRANCE +33 (0)5 62 18 79 40
GERMANY +49 (0)7151 406 0
GREECE +30 210 67 77 717
HUNGARY +36 (0)1 475 13 60
ITALY +39 0362 58 911
NETHERLANDS +31 (0)297 540 703
PORTUGAL +351 22 541 90 85
SLOVAK REPUBLIC +421 (0)3377 254 28
SOUTH AFRICA +27 (0)11 807 4887
SPAIN +34 918 300 451
SWITZERLAND +41 (0)31 818 40 90
UNITED KINGDOM +44 (0)1494 53 27 61

For detailed information see www.teleflexmedical.com/contact

The products in this catalogue are only available for EMEA (Europe, Middle East, Africa).
For further information contact your local representative. All data current at time of printing
(10/2009). Subject to technical changes without further notice.

94 05 37 - 00 00 01 - REV A - AH / SF - 12 09 XX