

# ZSI 375 PF

## SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ



### Rozwiązanie problemu ciężkiego nietrzymania moczu u mężczyzn

- regulowany mankiet: uniwersalny rozmiar
- więcej informacji na: [www.zsimplants.ch](http://www.zsimplants.ch)  
[www.medicosystems.pl](http://www.medicosystems.pl)  
[www.zwieracze.pl](http://www.zwieracze.pl)

ZEPHYR Surgical Implants posiada ISO 13485 : 2004  
Sztuczny zwieracz cewki moczowej ZSI 375 PF posiada certyfikat CE.


Dystrybutor w Polsce

MEDICO SYSTEMS  
ul. Droga Męczenników Majdanka 119  
20-325 Lublin, tel. 81 710 40 00  
e-mail: [med@medicosystems.pl](mailto:med@medicosystems.pl)  
[www.medicosystems.pl](http://www.medicosystems.pl)

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)  
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis  
1227 Les Acacias - Switzerland



## REGULOWANY MANKIET OD 3.75 DO 5 cm

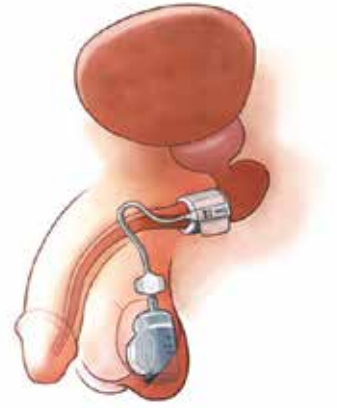

- 1 ZSI 375 PF
- 2 STRZYKAWKA 5 ML
- 3 IGŁA TYPU HUBER

1 ZWIERACZ JEST AKTYWOWANY  
KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE  
PO STRONIE POMPKI



2 PRZEGRODA ZBIORNIKA  
WYRÓWNAWCZEGO

4 PRZYCIŚK POMPKI DO  
OPRÓŻNIANIA MANKIETU  
(NACIŚNIJ-PUŚĆ)



5 ZWIERACZ JEST DEZAKTYWOWANY  
KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE  
PO PRZECIWNEJ STRONIE  
NIŻ PRZYCIŚK POMPKI



6 POMPKA

7 SKRZYDEŁKA DO PRZYSZYCIA  
ZWIERACZA ZSI 375 PF  
DO WEWNĘTRZNEJ TKANKI MOSZNY



8 REGULOWANY MANKIET  
OD 3,75 DO 5 CM W Kształcie  
OPASKI



9 PRZEGRODA UKŁADU  
HYDRAULICZNEGO

### WYKONAJ ZDJĘCIE RTG MOSZNY ABY SPRAWDZIĆ POZYCJĘ SPRĘŻYNY



Sprężyna jest w pełni ściśnięta.  
Znajduje się poniżej górnej krawędzi  
cylindra.  
**Zwieracz ZSI 375 PF  
jest dezaktywowany.**



Sprężyna jest w prawidłowej pozycji.  
Znajduje się na wysokości górnej  
krawędzi cylindra.  
**Zwieracz ZSI 375 PF  
jest aktywowany.**



Sprężyna jest zupełnie rozprężona  
W układzie hydraulicznym  
jest zbyt mało płynu.

### MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYTWARZANEGO CIŚNIENIA



### DZIAŁANIE

