

GELITA® EASYTIP – większy zasięg

Precyzyjne podawanie hemostatyku GELITA-CEL® CA POWDER nawet do trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie

- Aplikator EASYTIP zakłada się na butelkę z hemostatykiem GELITA-CEL® CA POWDER
- W tym celu należy wsunąć szyjkę butelki w odpowiedni otwór aplikatora EASYTIP
- Upewnić się, że butelka została zamocowana, lekko naciskając aplikator

Wskazania

Aplikator **EASYTIP S**, z kaniulą o długości 12 cm, przeznaczony jest np. do operacji w podstawie czaszki lub resekcji migdałków. Aplikatorem można posługiwać się przy użyciu jednej ręki, co daje chirurgowi większą swobodę pracy.

- Aplikator **EASYTIP XL** nadaje się szczególnie do operacji wymagających dalekiego zasięgu, np. do małoinwazyjnych zabiegów laparoskopowych. Kaniula o długości 40 cm pozwala na łatwe naniesienie sproszkowanego hemostatyku na powierzchnię rany poprzez trokar.


Zalety

- Elastyczny wąż
- Możliwość zginania/zakrzywiania a oraz zachowania pożądanego kształtu
- Łatwe podłączanie butelki z hemostatykiem GELITA-CEL® CA POWDER




Główne czynności podczas zabiegu

1.

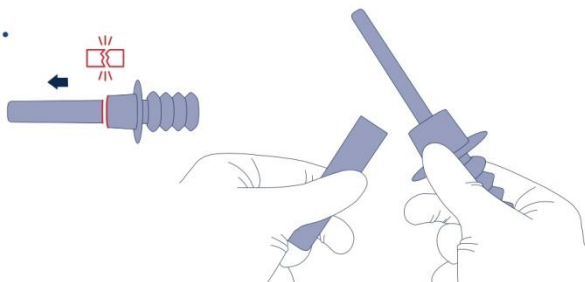


Zdjąć zakrętkę z butelki ze sproszkowanym hemostatykiem

2.

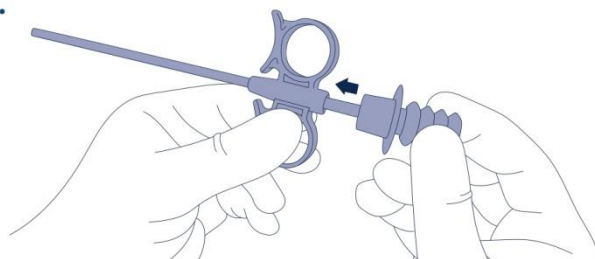


Lekko dociskając, wprowadzić butelkę do otworu aplikatora GELITA® EASYTIP

3.

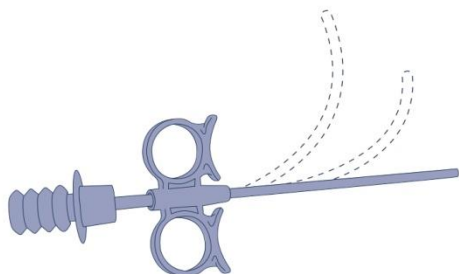


Wygiąć kaniulę do pożądanego kształtu

4.

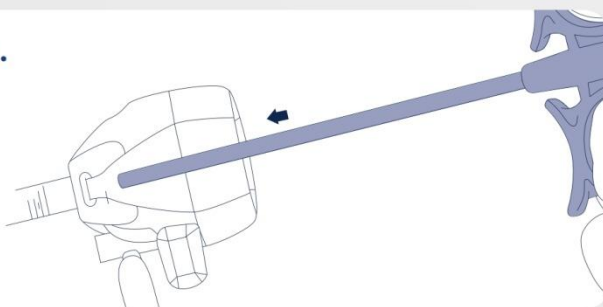

Wprowadzić kaniulę aplikatora do wnętrza trokara

5.

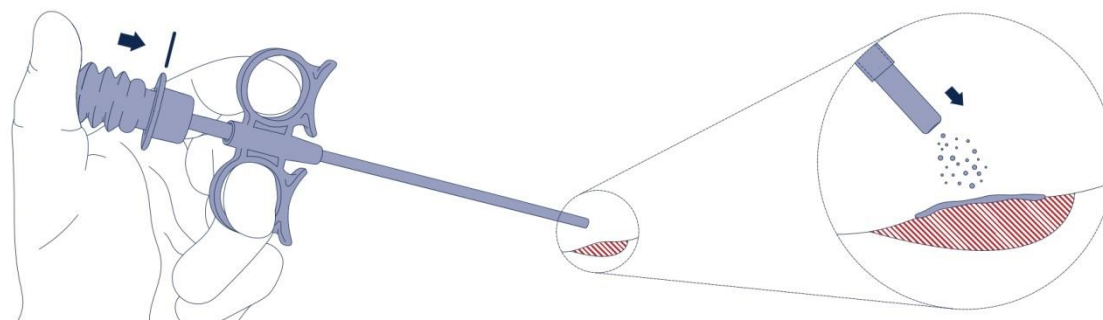

Umieścić końcówkę aplikatora nad miejscem krwawienia. Wielokrotnie naciskając harmonijkę aplikatora równomiernie rozprowadzić proszek w miejscu krwawienia do momentu uzyskania hemostazy

GELITA® EASYTIP

	Rozmiar	Sztuk/opak.	Nr kat.
GELITA® EASYTIP S	120 mm	5	GET-120 S
GELITA® EASYTIP XL	400 mm	5	GET-400 XL

Lokalny dystrybutor



GELITA MEDICAL GmbH
Uferstraße 7, 69412 Eberbach, Niemcy
Faks +49 (0) 6271 84-2700
service@gelitamedical.com
www.gelitamedical.com

OB 10833.01
Wersja: Listopad 2017