




Ostrzeżenie

NIE dotykać bezpośrednio dystalnego końca endoskopu (zwłaszcza światłowodu) przez dłuższy czas, gdy emitowane jest światło. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do oparzenia.

- Uruchamiać dźwignię regulacji wyginania kąтового endoskopu i sprawdzić, czy wyświetlany jest obraz zamierzonego kierunku, odpowiadający wygięciu kątowemu odcinka wyginanego. Należy również sprawdzić takie nieprawidłowości jak występowanie szumów na obrazie endoskopowym lub brak obrazu.

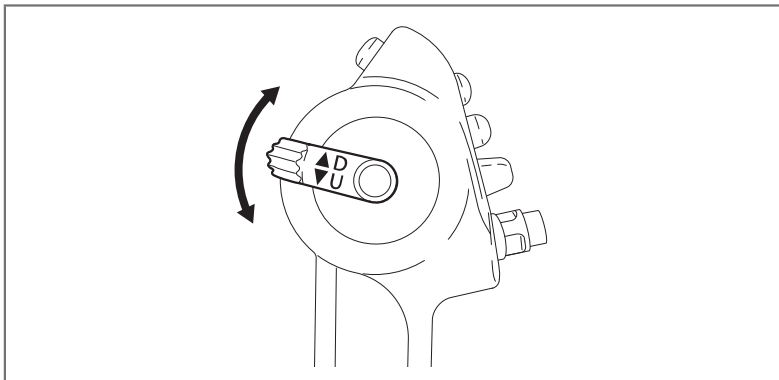


Ryc. 3.37

Kontrola przycisków Remote



Zagrożenie

Należy zawsze kontrolować przyciski Remote, nawet jeśli ich stosowanie NIE jest przewidywane. Podczas zabiegu obraz endoskopowy może zatrzymać się lub mogą wystąpić inne nieprawidłowości, co może prowadzić do zranienia pacjenta.

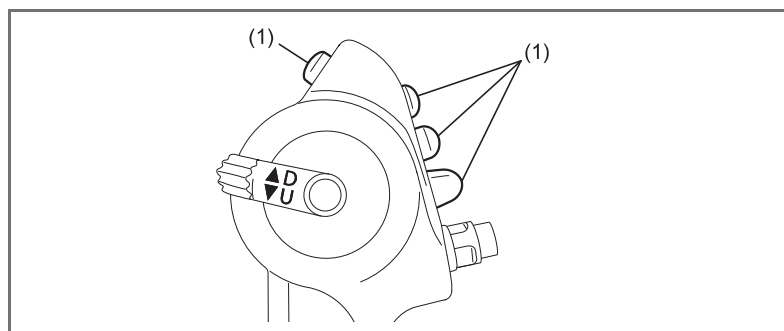

(1) Przycisk Remote

Ryc. 3.38

- Nacisnąć każdy z przycisków Remote.
- Potwierdzić, że funkcja przydzielona do każdego przycisku Remote działa prawidłowo.

Kontrola funkcji płukania



Zagrożenie

Do kontroli funkcji płukania należy używać sterylnej wody. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może stanowić ryzyko zakażenia.

- Napełnić strzykawkę sterylną wodą.