


Kontrola przycisków zdalnego sterowania



Zagrożenie

Należy zawsze kontrolować przyciski zdalnego sterowania, nawet jeśli ich stosowanie NIE jest przewidywane. Podczas zabiegu obraz endoskopowy może zatrzymać się lub mogą wystąpić inne nieprawidłowości, co może prowadzić do zranienia pacjenta.

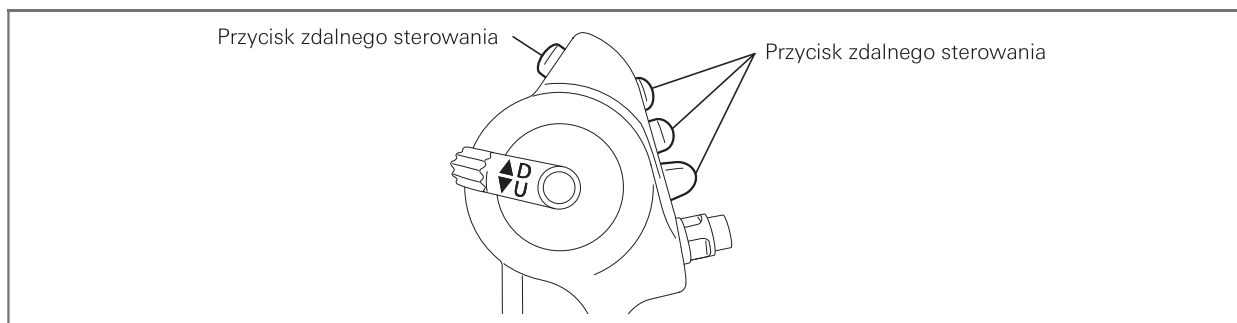

Ryc. 3.42

1. Nacisnąć każdy z przycisków zdalnego sterowania.
2. Potwierdzić, że funkcja przydzielona do każdego przycisku zdalnego sterowania działa prawidłowo.


Kontrola obrazu ultrasonograficznego



Uwaga

Informacje dotyczące obsługi ultradźwiękowej jednostki skanującej można znaleźć w odpowiedniej instrukcji ultradźwiękowej jednostki skanującej.

1. Włączyć ultradźwiękową jednostkę skanującą.
2. Sprawdzić, czy obraz ultrasonograficzny jest wyświetlany wyraźnie i prawidłowo na ekranie ultradźwiękowej jednostki skanującej.

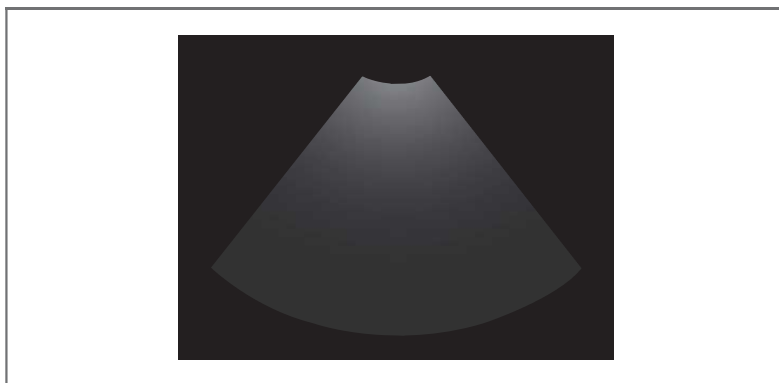

Ryc. 3.43