

	Rolkowy regulator przepływu jest zamknięty	Otwórz całkowicie rolkowy regulator przepływu	6.2 Przygotowanie urządzenia
Pedał nie działa (Dioda świeci)	Pedał nie został podłączony	Podłącz pedał do gniazda z tyłu urządzenia	5.0 Ogólny zarys urządzenia 6.2 Przygotowanie urządzenia
	Niewłaściwe napięcie	Sprawdź zgodność z instrukcją	7.2 Regulacja procesu infiltracji 6.2 Przygotowanie urządzenia

Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, prosimy skontaktować się ze swoim dostawcą lub z autoryzowanym centrum serwisowym. Adresy znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji, pod nazwą „Centra serwisowe”.

11 Lista części zamiennych wraz z numerami zamówienia

Akcesoria	Art. Nr
Pedał ON/OFF, IP68 -----	1513
Pedał Vario, IP68 -----	1501
Stojak na butelkę z płynem do irygacji -----	1770

Zestaw rurek z igłą, rolkowy regulator przepływu oraz Luer Lock, sterylny, 4 m, jednorazowego użytku	6022

Dispenser DP 30 - Instrukcja obsługi na CD-ROM -----	31678*

** Drukowana wersja instrukcji obsługi jest dostępna bezpłatnie w Nouvag AG. Przy zamówieniu prosimy zaznaczyć, iż życzą sobie Państwo otrzymać wersję drukowaną.*

Aby zamówić części dodatkowe, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Załącznik