

Inkubator otwarty dla wcześniaków i noworodków


Atom Infant Warmer Model 103

ORIGINAL

CE 0123

*Infa Warmer*i**

Instrukcja obsługi

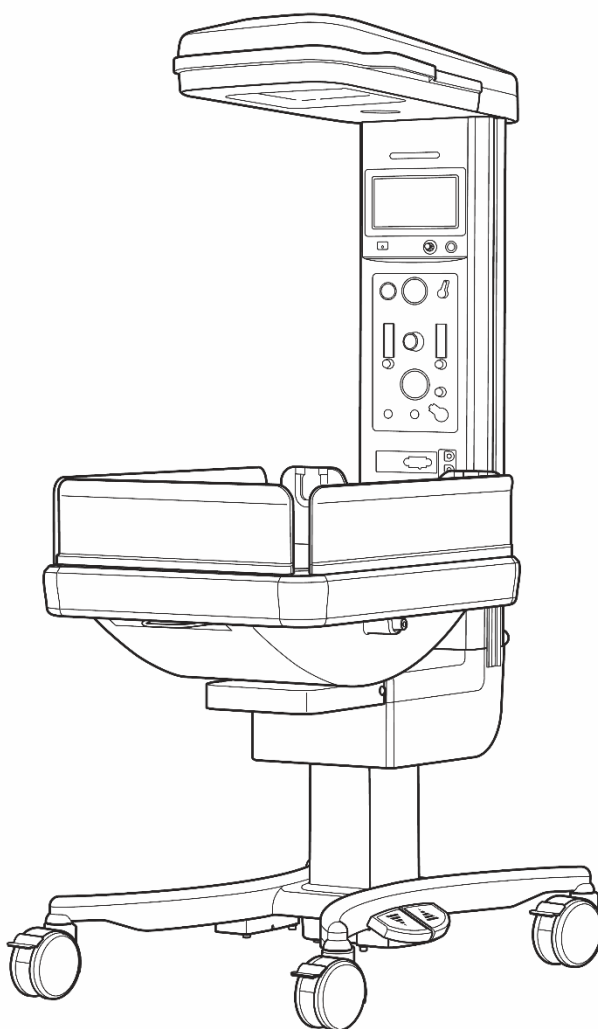


DO UŻYTKOWNIKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSERWACJĘ INKUBATORA:

- Przed uruchomieniem inkubatora uważnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące obsługi dodatkowych funkcji.
Prosimy ominąć sekcje niezwiązane ze sprzętem, który Państwo posiadacie.

9-3. Oświetlenie

Lampa oświetlenia znajduje się w zespole czaszy. Użyj włącznika światła na panelu operacyjnym, aby włączyć / wyłączyć lampę. Lampa gaśnie, gdy przełącznik sterowania oświetleniem zostanie całkowicie przekręcony w lewo. Intensywność wzrasta po obroceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

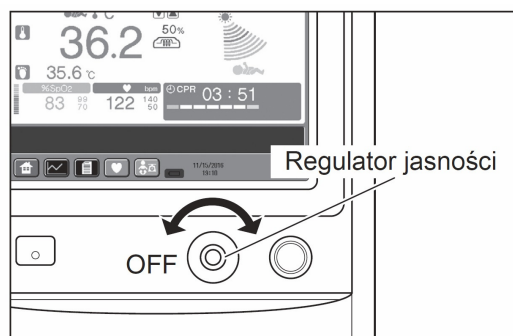

9-4. Obracanie głowicy grzewczej



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Zabrania się zawieszania materiałów łatwopalnych na kopule. Istnieje ryzyko wybuchu pożaru.



Zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru, kiedy głowica grzewcza jest obrócona. Istnieje ryzyko wystąpienia hipotermii u noworodka.




Zabrania się opierania się o głowicę grzewczą lub poruszania nią z użyciem nadmiernej siły. Może to spowodować awarię.

Głowicę grzewczą można obrócić w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby nie stanowiła przeszkody podczas radiografii, bądź też przechylić, w zależności od potrzeby.

Kiedy głowica grzewcza jest pochylona pojawi się na ekranie informacja oraz sygnał dźwiękowy.

Głowica może być obrócona o $\pm 120^\circ$ (w obu kierunkach) względem centralnej pozycji oraz pochylana o kąt $\pm 30^\circ$, dzięki czemu światło i promiennik będą nadal skierowane na powierzchnię materacyka.

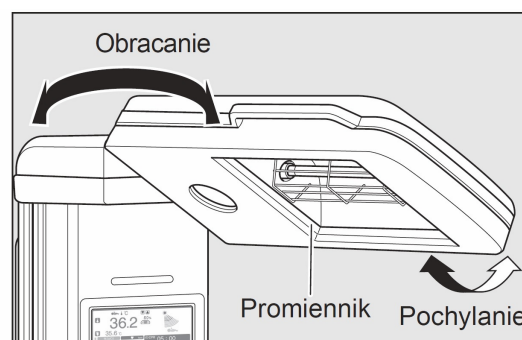

9-5. Ścianki boczne



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Należy regularnie sprawdzać, czy ścianki są prawidłowo zablokowane.



Kiedy ścianki zostaną rozłożone i zablokowane należy upewnić się, czy fragmenty prześcieradła lub tkaniny nie znajdują się pomiędzy ściankami i platformą materaca.



Jeśli jakikolwiek fragment prześcieradła lub tkaniny znajdzie się pomiędzy ściankami a platformą materaca, należy go usunąć. W przeciwnym wypadku ścianki nie zostaną poprawnie zablokowane. W efekcie ścianki mogą odchylić się w dół powodując wypadnięcie noworodka oraz jego poważne lub śmiertelne okaleczenie.



Kiedy ścianki są opuszczone noworodek może wypaść. Zabrania się pozostawiania urządzenia bez nadzoru z opuszczonymi ściankami.




UWAGA




Użytkowanie urządzenia ze złożonymi ściankami może mieć negatywny wpływ na rozkład temperatury, w porównaniu z sytuacją, w której ścianki są rozłożone i zablokowane.

Wszystkie ścianki, z wyjątkiem jednej umieszczonej na kolumnie wspierającej (wyposażonej w przepusty do mocowania przewodów i rur pacjenta), mogą zostać odchyłone o kąt 180° (złożone) za pomocą wbudowanego mechanizmu wolnego opadania. Nie zasłaniają dostępu do opcjonalnej szuflady. Aby złożyć ściankę należy pociągnąć ją do góry a następnie do siebie. Aby przywrócić ją do poprzedniego ustawienia należy podnieść ją do pozycji pionowej, a następnie obniżyć w celu zablokowania. Ścianki wykonane zostały z bezbarwnego tworzywa odpornego na promienie UV, odpornego na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych.

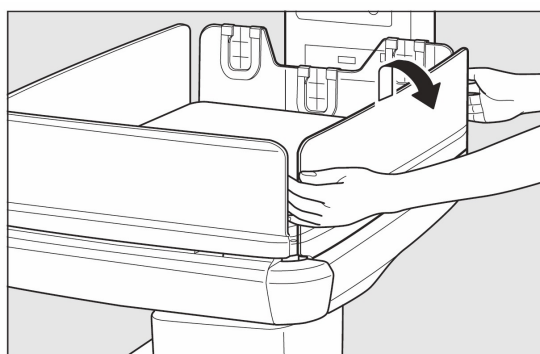

9-5-1. Wyjmowanie ścianek bocznych

- (1) Opuść całkowicie ściankę, następnie obróć blokadę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do skrajnej pozycji i przeciągnij ją w prawo.

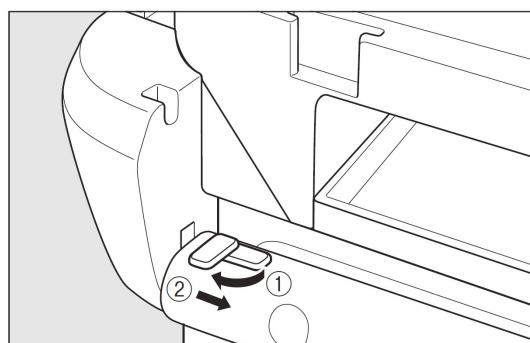

Akcesoria dodatkowe &
numer zamówienia

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Czujnik pomiaru temperatury, O.D. 5 mm (żółty) | : 60883 |
| Czujnik pomiaru temperatury, O.D. 10 mm (żółty) | : 60882 |
| Pokrowiec | : 94201 |
| Uchwyt przewodu (5 szt./opak.) | : 61071 |
| Dwie szuflady na akcesoria | : 60988 |

