



WUHAN TOPMED TRADING CO.,LTD

Fartuch medyczny jednorazowy z włókniny

Nr katalogowy : TG02B-12104K

I. OPIS			
1. INFORMACJE GENERALNE		2. SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Produkt	Fartuch ochronny wykonany z włókniny.	Charakterystyka	Wykonany z włókniny flizelinowej, wiązany na troki w okolicy talii i kołnierza. Rękawy zakończone mankietem gumką. Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach.
Numer artykułu	TG02B-12104K	Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania: CE Nr. G2S 074142 0008 Rev. 00	
Rozmiar	L, XL		
Elastyczne	Nie		
Standard	1	Kolor szwów	Niebieski, zielony
Sterylność	Nie	Producent:	
Użycie	Dla personelu medycznego	Wuhan Topmed Trading Co., LTD C5-1203 Rongchuangzhigu, No.555 Cultural Avenue Hongshan District 430070 Wuhan city, Hubei province CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA	
3.Materiał			
	Materiał	Gramatura	Kolor
Tkanina	Włóknina flizelinowa	25 g/m ²	Niebieski, zielony



Zgodny z normami:

**Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz z
PN EN 13795-2**

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15223-1:2016

EN ISO 20417:2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10:2013

Instrukcja użycia:

1. Upewnij się, że rozmiar jest dostosowany do użytkownika. Nie modyfikuj produktu.
2. Sprawdź, czy produkt nie ma defektów i czy jest w dobrej kondycji (dziury, niedoszycia, itp.).
3. Weź produkt w ręce i rozwiń go.
4. Wsuń ręce w rękawy, trzymaj ręce na wysokości barków.
5. Nałóż produkt.
6. Zawiąż trok przy szyi.
7. Zawiąż trok w pasie.

For and on behalf of
武汉拓迈贸易有限公司
WUHAN TOPMED TRADING CO., LTD

Authorized signature