


## Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™

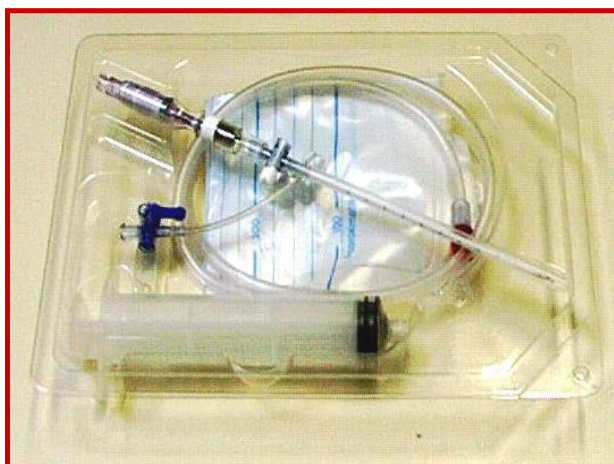

Kod Produktu	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu
8888566067	Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™ ,tacka, sterylny	10

### Opis produktu

Bezpieczny system do torako-i paracentezy Turkel™ zawiera tępą sprężystą wewnętrzną kaniulę umieszczoną w ostro zakończonej igle. Gdy igła i tępa kaniula wnikają w ścianę klatki piersiowej lub obszar brzucha, tępa kaniula cofa się w trzon igły. Kiedy igła napotyka niski opór, taki jak obszar wysięku opłucnej w obrębie przestrzeni opłucnowej, sprężysta kaniula automatycznie wysuwa się poza fazę, chroniąc leżącą pod nią tkankę przed dalszą, niezamierzoną penetracją. Kolorowy wskaźnik umieszczony w piaście igły zapewnia bezpośrednią wizualizację tępej kaniuli podczas wprowadzania igły. Zawór jednokierunkowy w obudowie igły umożliwia wydostawanie się powietrza i płynu z igły, ale zapobiega przedostawaniu się powietrza atmosferycznego do wolnej wnęki. Bliższy koniec zespołu cewnika zawiera zawór kulowy i wewnętrzny zawór odcinający, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do cewnika po usunięciu zespołu igły.

### Tacka zawiera:

- Bezpieczną igłę do torako- i paracentezy 16 ga
- Dren 8 Ch, dł. 12,5 cm - Cewnik poliuretanowy ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników)
- Strzykawkę Monoject™ luer-lock 50 ml
- kranik trójdrożny z przedłużaczem zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu.
- Worek do drenażu 2000 ml.

