

BACTICID AF

Preparat na bazie dwóch alkoholi do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych w placówkach służby zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrący i drażniący drogi oddechowe, nie zawiera aldehydów
- o wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów, możliwość użycia w pionie żywnościowym (podwójna rejestracja)
- o posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji
- o nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
- o łatwo dociera w trudnodostępne miejsca
- o wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem)
- o preparat przebadany zgodnie z normą 16615:2015

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii)	15 sekund
EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy (Candida Albicans)	15 sekund
EN 13624 Grzybobójczy (Aspergillus brasiliensis)	2 minuty
EN 13967 Grzybobójczy (Aspergillus brasiliensis)	1 minuta
EN 14348, EN 14563 Prątkobójczy (M.Avium i M.Terrae)	30 sekund
EN 14476 HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota	15 sekund
Adeno	30 sekund
Polio	2 minuty

SPOSÓB UŻYCIA:

Bactacid AF jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ścierki i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie spryskiwać preparatem z odległości około 30 cm.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol 57g/100g, Propan-2-ol 6g/100g, substancje zwilżające

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Bactacid AF jest preparatem na bazie dwóch alkoholi i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 7626/19 na obrót produktem biobójczym

Wyrób Medyczny kl.IIa

Znak CE 0537

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Kanister	5L	3x5L
Butelka	1L atomizer	8x1L
Butelka	1L	8x1L
Butelka	0,5L atomizer	

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9

15-528 Sowłany

Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132

10917 Tallinn

ESTONIA