

STERISEPT PLUS

Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o nie zawiera aldehydów i fenoli, wysoce bezpieczny dla personelu i pacjentów
- o posiadający szerokie spektrum działania w niskim stężeniu roztworu 0,25% i bardzo krótki czas ekspozycji
- o wykazuje skuteczność mikrobójczą w warunkach brudnych
- o nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia się na dezynfekowanych powierzchniach
- o możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych
- o roztwór roboczy wykazuje aktywność powyżej 30 dni
- o posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny kl. IIa i produkt biobójczy

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	5 min	15 min
EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella)		0,25%
EN 13624 Grzyby		
EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)		0,5%
EN 14476 BVDV,HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota	0,5%	0,25%

SPOSÓB UŻYCIA:

Roztwór preparatu Sterisept Plus przygotować zgodnie z tabelą stężeń przez dodanie odpowiedniej ilości koncentratu do odmierzanej ilości wody wodociągowej. Dekontaminację powierzchni przeprowadzić za pomocą ścierki, mopa lub urządzeń spryskujących. Wyroby, które można zanurzyć, dezynfekować metodą zanurzeniową. Należy zwrócić uwagę aby przedmioty były całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem roboczym.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Dodocylamina – 12,5g/100g, QAV – 12,5g/100g

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Sterisept Plus wykazuje szeroką kompatybilność materiałową, pozwala na zastosowanie go do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wykonywanych praktycznie ze wszystkich materiałów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Wyrób Medyczny kl.IIa znak CE 0537

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7951/20

KONFEKCYJONOWANIE:

Opakowanie	Pojemność	Karton
Kanister	5L	3x5L
Butelka	1L z dozownikiem	12x1L

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9

15-528 Sowłany

Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132

10917 Tallinn

ESTONIA