



# Titan® Chlor Plus Tablets


**Tabletki na bazie aktywnego chloru  
do dezynfekcji i mycia powierzchni  
oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.**

- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- dodatkowa skuteczność wobec szczepów opornych
- pełne działanie wiruso- i sporobójcze
- idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych
- doskonałe właściwości myjące
- łatwe przygotowanie roztworów roboczych

Preparat do użytku profesjonalnego.  
Produkt biobójczy – pozwolenie  
nr 6473/15 (Kat. I, gr. 2 i 4)

# Titan® Chlor Plus Tablets

Tabletki na bazie aktywnego chloru  
do dezynfekcji i mycia powierzchni  
oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń.

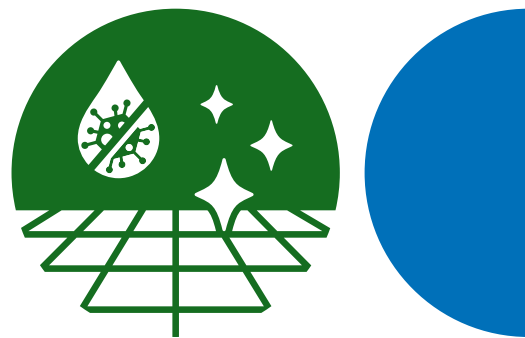

## PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo- i prątkobójczy oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (B.subtilis, C.difficile, C.difficile R027) potwierdzone badaniami
- dotychczas przebadany zgodnie z normą EN 17126
- wykazuje dodatkową skuteczność biobójczą wobec szczepów opornych: L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica
- połączony również do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- stężenie: min. 1000 ppm; czas działania: min. 5 min.
- stabilność nieużywanego roztworu roboczego - min. 1 dzień
- zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalnin oraz innych zabrudzeń organicznych
- możliwość zanurzania przedmiotów w roztworach w celu dezynfekcji, np. kacek i basenów
- doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów myjących

## SKŁAD CHEMICZNY

**100 g płynu zawiera:**  
troklozen sodowy (523 g/kg), tenzydów myjące.  
Każda tabletki o masie 3,25 g zawiera 1,7g aktywnego chloru.

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

**Preparat wykazuje działanie:**  
bakterio-, drożdżako- grzybo-, prątkobójcze  
- w 15 min. oraz pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) i sporobójcze (C.difficile, C.difficile R027 - 5 min., B.subtilis -10 min.) - 15 min.

## OPAKOWANIA

Titan® Chlor Plus Tablets: puszka - 200 szt. tabletek (Nr kat. wewn. 6338)

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.  
Stosować w wodnych roztworach roboczych.

- Odpowiednią liczbę tabletek (zgodnie z tabelą dawkowania) rozpuścić w zimnej wodzie wodociągowej. Aby uzyskać roztwór roboczy o zawartości 1000 ppm aktywnego chloru należy rozpuścić 1 tabletkę w 1 l wody.
- Odczekać aż tabletki dokładnie się rozpuszczą, roztwór delikatnie zamieszać.
- Nanosić na powierzchnie za pomocą ścierki lub mopa.
- Powierzchnie dokładnie zmyć roztworem. Dezynfekowane przedmioty zanurzyć w roztworze. Odczekać wymagany czas ekspozycji.
- Powierzchnie pozostające w kontakcie z żywnością po przeprowadzonej procedurze dezynfekcyjnej należy zmyć dodatkowo wodą zdatną do picia.

	Powierzchnie czyste: niezanieczyszczone organicznie		Powierzchnie brudne: zanieczyszczone organicznie		
SPEKTRUM BIOBÓJCZE	B (L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica), F (A.brasilensis), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (C.difficile, C.difficile R027)	B.subtilis	B (L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica), F (A.brasilensis), Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (C.difficile)	B.subtilis	C.difficile R027
STĘŻENIE	1 000 ppm (1 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	2 000 ppm (2 tab./1l wody)	5 000 ppm (5 tab./1l wody)
CZAS EKSPOZYCJI	15 min.	10 min.	15 min.	60 min.	5 min.
1 tab.	1 l wody	500 ml wody	500 ml wody	500 ml wody	200 ml wody
2 tab.	2 l wody	1 l wody	1 l wody	1 l wody	400 ml wody
5 tab.	5 l wody	2,5 l wody	2,5 l wody	2,5 l wody	1 l wody
10 tab.	10 l wody	5 l wody	5 l wody	5 l wody	2 l wody

**UWAGA! Preparatów chlorowych nie należy stosować do dezynfekcji moczu i wymiocin.**

**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

## Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w chłodnym miejscu, w zamkniętym pojemniku z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Wchodzi w reakcję z kwasami uwalniając toksyczny gazowy chlor. Nie przechowywać razem z kwasami.

## Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Informacje ogólne:

Objawy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilku godzinach. Kontrola lekarska niezbędna jest co najmniej przez 48 godzin po zdarzeniu.

W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

**Wdychanie:** w przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza. **Kontakt przez skórę:** zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza. **Kontakt z oczami:** natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płuścić kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza. **Połykanie:** wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. Odczekać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Titan Chlor Plus Tablets, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

## PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Sp. z o.o.**

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2509-06

## PODMIOT ODPOWIEDZIALNY W POLSCE:

**Diversey Polska Sp. z o.o.,**  
02-305 Warszawa • Al. Jerozolimskie 134  
T: 22/328-10-00

## WYTWÓRCA:

**Diversey Europe Operations B.V.**  
Maarssebroeksedijk 2 • 3542 DN Utrecht  
The Netherlands • diversey.com



medilab.pl