

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku Medex-Eko (...)

- I. Fartuchy są wyrobem niejałowym, dostępnym w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL
- II. Fartuchy serii Medex-Eko są przeznaczone do użytku na bloku operacyjnym w celu ochrony rany operacyjnej pacjenta przed czynnikami infekcyjnymi pochodzącymi od zespołu operacyjnego.
- III. Fartuchy serii Medex-Eko są wyrobem wielokrotnego użytku, który może być użyty 100-krotnie z zachowaniem swoich właściwości barierowych pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez użytkownika oraz bezwzględnie wdrożenia technologii prania przez pralnię obsługującą;

IV. PRANIE + DEZYNFEKCJA.

Płukanie wstępne	woda zimna	czas	5 min.
Pranie wstępne	temp. 35 - 50°C	czas	5-10 min.
Pranie zasadnicze	temp. 65 - 75°C	czas	20 min.
Schładzanie	temp. 40°C		
Płukanie	ciepła + zimna woda	czas	15-20 min.
Wirowanie	400 obr/min.	czas	4 min.
Suszenie	temp. max. 80°C	czas	15-20 min.

STERYLIZACJA

Sterylizować w autoklawach parowych w temperaturze 134°C przez 5-7 min., lub w 121°C przez 15 min, suszenie max. 15 min.

Maksymalny wsad do pralnicy, tunelu, suszarki: 70%

W ostatnim etapie prania, powinno odbyć się zakwaszenie do poziomu pH 5.5 – 6.5.

UWAGA: Nie sterylizować w jednym wsadzie fartuchów z metalowymi kontenerami.

V. Inne wskazówki.

1. W celu dokładnego ustalenia technologii prania należy skonsultować się ze swym dostawcą środków chemicznych oraz firmą Garmex,
2. Należy regularnie kontrolować powierzchnię przestrzeni ładunkowych pralek i suszarek, celem sprawdzenia, czy nie ma tam miejsc szorstkich, które mogłyby uszkodzić tkaninę.
3. Fartuchy mogą być prane wyłącznie w tradycyjnych pralnicach bębnowych.
4. Dwa spłukania strumieniem zimnej wody powinny usunąć krew. W przypadku nie usunięcia plam krwi należy na kilkanaście godzin namoczyć fartuch w zimnej wodzie z dodatkiem enzymu piorącego.
5. Niejonowy środek piorący powinien mieć temperaturę mętnienia powyżej 70°C.
6. Wybielanie nie powinno być konieczne. W przypadku konieczności usuwania plam należy stosować wybielacze nie zawierające chloru.
7. Należy wyłącznie stosować środki piorące posiadające wpis do rejestru U.R. Wyrobów Medycznych.
8. W celu zachowania właściwości fartuchów barierowych nie należy ich prać z bielizną bawełnianą.
9. W przypadku utraty barierowości przed upływem 100 cykli użyć, należy poddać fartuchy procesowi impregnacji.

UWAGA: Po użyciu odznaczyć niezmywalnym pisakiem kolejną ze stu krutek monitorujących nieprzekroczenie 100cykli użycia, na które producent daje gwarancję.

VI. Ostrzeżenia.

1. Nie wolno prać fartuchów w tunelach przemysłowych wyposażonych w prasę.
2. Nie wolno maglować fartuchów.
3. Nie wolno przeladowywać pralki i suszarki (w przeciwnym wypadku tekstylia będą ulegały zagnieceniom)
4. Płukanie powinno spowodować usunięcie środków piorących. Pozostałości środków piorących niekorzystnie wpływają na właściwości tkanin.
5. pH kąpieli piorącej maksymalnie 10,5.
6. Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających.
7. Nie należy stosować środków piorących zawierających chlor.
8. Fartuchy użyte, po operacji powinny być przechowywane jak najkrócej w chłodnych pomieszczeniach oraz przekazane jak najszybciej do pralni tak, aby nie doszło do zaparzenia bielizny.
9. Nowy fartuch przed pierwszym użyciem musi być bezwzględnie wyprany.



INSTRUKCJA UŻYWANIA

ODZIEŻ OPERACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU – MEDITEX-EKO

- I. Ubranie Meditex-Eko jest wyrobem niejałowym przeznaczonym do minimalizacji rozprzestrzeniania się bakterii w obrębie bloku operacyjnego, dostępnym w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL
- II. Ubranie Meditex-Eko jest wyrobem wielokrotnego użytku, który może być użyty do 150 razy z zachowaniem swoich własności pod warunkiem stosowania niniejszej instrukcji przez użytkownika oraz bezwzględne wdrożenie technologii prania przez pralnię obsługującą:

III. PRANIE + DEZYNFEKCJA

Płukanie wstępne	woda zimna	czas	5min.
Pranie wstępne	temp. 35 – 50°C	czas	5-10min.
Pranie zasadnicze	temp. 65- 75°C	czas	20min.
Schładzanie	temp. 40°C		
Płukanie	ciepła + zimna woda	czas	15-20min.
Wirowanie	400obr/min.	czas	4min.
Suszenie	temp. max. 80°C	czas	20min.
Maglowanie	temp. max 150°C		

Maksymalny wsad do pralnicy, tunelu: 70%



UWAGA: Informacje na temat sposobu prania, zawarte na powyższej wszywce odzieżowej. Są informacjami ogólnymi. W celu dokładnego ustalenia technologii prania należy się skonsultować ze swym dostawcą chemicznych środków piorących oraz firmą Garmex.

IV. Inne wskazówki.

1. Należy regularnie kontrolować powierzchnię przestrzeni ładunkowych pralek i suszarek, celem sprawdzenia, czy nie ma tam miejsc szorstkich, które mogłyby uszkodzić tkaninę.
2. Ubrania Meditex-Eko mogą być prane w tradycyjnych pralniach szpitalnych oraz w pralniach przemysłowych.
3. Niejonowy środek piorący powinien mieć temperaturę mętnienia powyżej 70°C.
4. Wybielanie nie powinno być konieczne. W przypadku konieczności usuwania plam z bielizny operacyjnej należy stosować wybielacze nie zawierające chloru.
5. Należy wyłącznie stosować środki piorące posiadające wpis do rejestru U.R. Wyrobów Medycznych.
6. W celu zachowania właściwości odzieży Meditex-Eko nie należy jej prać z bielizną bawełnianą.

V. Ostrzeżenia.

1. Płukanie powinno spowodować usunięcie środków piorących. Pozostałości środków piorących niekorzystnie wpływają na własności tkanin.
2. Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających.
3. Należy stosować środki piorące nie zawierające chloru.
4. pH kąpeli piorącej maksymalnie 10.
5. Temp. maglowania max. 150°C
6. Nowe ubranie przed pierwszym użyciem musi być bezwzględnie wyprane.

VI. Sterylizacja.

1. Wyroby używane jako sterylne sterylizować w autoklawie parowym przez 20min w temperaturze 121°C lub przez 4min w temperaturze 134°C.