

ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII metodą Griggsa - **BLUgriggs®**



AKME

02-826 Warszawa ul. Poloneza 89B tel.: 22 853-50-69, -70, -72 fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl www.akme.com.pl

Zestaw do zabiegu przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa - BLUgriggs® marki Portex, oparty na użyciu dedykowanego **peana** (narzędzia wielorazowego użytku) pozwala na dylatację tchawicy i wprowadzenie rurki tracheostomijnej metodą przezskórną przy użyciu **techniki Seldingera** z wykorzystaniem prowadnicy.

Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu przezskórnej tracheotomii w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej lub sali operacyjnej.



Ukształtowanie kanału stomijnego następuje poprzez rozszerzenie (dylatację) tkanek pomiędzy pierścieniami tchawicy przy użyciu stalowego **peana** (specjalnie zaprojektowanych i wyprofilowanych kleszczy rozszerzających, których ramiona są wprowadzane do tchawicy po prowadnicy Seldingera). Duża powierzchnia ramion kleszczy pozwala na równomierne rozłożenie siły wywieranej na ścianki tchawicy przy rozwieraniu narzędzia, co minimalizuje ryzyko nadmiernego, miejscowego nacisku i uszkodzenia tchawicy. Zabieg bez konieczności wielokrotnej penetracji tchawicy.

Prowadnica Seldingera z końcówką „J” oraz znacznikami głębokości jest wprowadzana przy pomocy specjalnie zaprojektowanego prowadnika, który umożliwia operatorowi odpowiednią kontrolę i łatwość użytkowania. Wygodna obsługa jedną ręką pozwala na użycie drugiej - do przytrzymania kaniuli - aż do wprowadzenia prowadnicy na odpowiednią głębokość. Podczas całego zabiegu prowadnica pozostaje in situ - co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo.



Przezskórna tracheotomia wykonywana metodą Griggsa jest minimalnie inwazyjną procedurą, która jest przeprowadzana w krótkim czasie, przy łóżku pacjenta, przez dwóch przeszkolonych operatorów

Skład zestawu do przezskórnej tracheotomii Portex® BLUgriggs®:

- skalpel nr 15
- strzykawki: 5 i 10 ml
- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G
- igła wprowadzająca 5 cm ze znacznikami głębokości
- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J”, ze znacznikami pozycjonującym
- krótki rozszerzacz 14F
- pean wielorazowego użytku (stal nierdzewna) lub zestaw bez peana
- rurka tracheostomijna BLUselect® lub BLUselect® Suctionaid z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal®
- mandryn do rurki tracheostomijnej, samoblokujący się, z otworem na prowadnicę
- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki i szczoteczka do czyszczenia kaniul
- opaska do rurki i podkładka pod rurkę tracheostomijną
- jałowy żel poślizgowy 5g (2 opak.)
- gaziki 9,5cm x 9,5cm (10 szt.)
- klin do rozłączenia układu
- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
- instrukcja użycia, naklejki informacyjne dot. pacjenta

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy z serwetą (ergonomiczne ułożenie elementów na tacy w kolejności użycia; w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).



Pean wielorazowego użytku dedykowany do metody Griggsa jest dostosowany do użycia z zestawami, które nie posiadają na wyposażeniu powyższego narzędzia (tj. z zestawami o nr kat. 101/543/xxx; 101/893/xxx).

Firma Smiths Medical (part of ICU Medical) nie odpowiada za konsekwencje użycia peana z zestawami innych producentów.



Rurka tracheostomijna Portex® BLUselect posiada miękki, cienkościenny mankiet niskociśnieniowy oraz system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu **Soft Seal®**. Balonik kontrolnym wyraźnie wskazuje na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) oraz posiada oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu. Rurka wykonana z termoplastycznego PCW, z elastycznym, przezroczystym kołnierzem z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki. Zaobłony, samoblokujący się (stabilność położenia przy wprowadzaniu rurki) mandryn posiada otwór na prowadnicę Seldingera. Rozmiary kodowane kolorem. Bez zawartości lateksu i DEHP. Widoczna w RTG. Warunkowe użycie w MRI.

Zestawy dostępne z rurkami tracheostomijnymi BLUselect z mankiem Soft Seal® lub BLUselect Suctionaid z mankiem Soft Seal® i wbudowanym w ściankę rurki przewodem do odsysania znad mankietu.

Dostępne konfiguracje:

Nazwa/rodzaj rurki tracheostom.	Pean (wielorazowy)	Rozmiar rurki tracheostom.	Nr katalogowy zestawu BLUgriggs®
BLUselect	●	7,0 mm	101/541/070
BLUselect	●	8,0 mm	101/541/080
BLUselect	●	9,0 mm	101/541/090
BLUselect		7,0 mm	101/543/070
BLUselect		8,0 mm	101/543/080
BLUselect		9,0 mm	101/543/090
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)	●	7,0 mm	101/891/070
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)	●	8,0 mm	101/891/080
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)	●	9,0 mm	101/891/090
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)		7,0 mm	101/893/070
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)		8,0 mm	101/893/080
BLUselect Suctionaid (z odsysaniem)		9,0 mm	101/893/090