

Części	Termin wymiany	Wykonawca
Kompletny układ rurek pacjenta wraz z osprzętem	Po każdym pacjencie, poza tym zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą szpitalną	Użytkownik/operator
Filtr zgrubny	W razie potrzeby, jednak co najmniej raz w roku	Użytkownik/operator lub autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH
Filtr HEPA	W razie potrzeby, jednak co najmniej raz w roku	Użytkownik/operator lub autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH
Akumulator zewnętrzny	<p>W celu zapewnienia prawidłowego działania wskaźnika stanu naładowania, zarówno akumulator wewnętrzny, jak i zewnętrzny należy kalibrować co sześć miesięcy. Akumulator należy całkowicie rozładować i naładować dwa razy pod rząd.</p> <p>Należy wymienić akumulator po 500 cyklach ładowania lub gdy pojemność akumulatora po całkowitym naładowaniu jest mniejsza niż 50%, jednak najpóźniej po 2,5 roku.</p>	Użytkownik/operator lub autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH
Akumulator	<p>W celu zapewnienia prawidłowego działania wskaźnika stanu naładowania, zarówno akumulator wewnętrzny, jak i zewnętrzny należy kalibrować co sześć miesięcy. Akumulator należy całkowicie rozładować i naładować dwa razy pod rząd.</p> <p>Należy wymienić akumulator po 500 cyklach ładowania lub gdy pojemność akumulatora po całkowitym naładowaniu jest mniejsza niż 50%, jednak najpóźniej po 2,5 roku.</p>	<p>Użytkownik/operator lub autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH</p> <p>Autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH</p>
Czujnik tlenowy	Wymiana przy odpowiednim komunikacie alarmowym na urządzeniu lub przy napięciu poniżej 6,5 mV	Użytkownik/operator lub autoryzowany serwis firmy FRITZ STEPHAN GMBH

Tabela 50: Prace konserwacyjne