

ARGOTIAB®



ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY W LECZENIU I REGENERACJI
ZMIAN SKÓRNYCH, MAŁYCH RAN, OPARZEŃ, ODLEŻYN

ARGOTIAB® KREM/ŻEL 50 ml e

Kremo-żel Argotiab jest wyrobem medycznym, którego głównym składnikiem jest kompleks bazujący na jonach srebra związanych kowalencyjnie z dwutlenkiem tytanu, którego główne działanie, w połączeniu z dimetikonem, polega na tworzeniu innej niż tradycyjna (bandaże lub plastry) bariery przeciwdrobnoustrojowej na zmiany skórne, w ten sposób:

- izoluje miejsca zastosowania od zewnętrznego ataku drobnoustrojów,
- ogranicza kolonizację drobnoustrojów w wyniku działania barierowego i zapewnia najlepsze warunki do regeneracji tkanek skóry.

ZASTOSOWANIE

Kremo-żel Argotiab, dzięki działaniu przeciwbakteryjnemu, przeciwgrzybicznemu, przeciwdrobnoustrojowemu, jest środkiem wspomagającym w leczeniu i regeneracji zmian skórnych, małych ran, otarć, oparzeń i odleżyn, maceracji skóry spowodowanej podrażnieniem przez nietrzymanie moczu u osób w podeszłym wieku lub wysypki pieluszkowej u dzieci, miejsc wprowadzenia cewnika naczyniowego (obwodowego i centralnego cewnika żylnego i tętniczego), sprzyjając prawidłowemu gojeniu.

SKŁAD

Olej mineralny, glikol propylenowy, PEG 30, dipolihydrosystearynian, palmitinian izopropylu, PPG-15 eter stearylu, izononian izononatylu, TIAB (kompleks jednowartościowych jonów srebra związanych kowalencyjnie z dwutlenkiem tytanu), chlorek benzalkoniowy, wosk pszczeł biolony, octan tokoferylu, dimetikon, siarczan magnezu, woda

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przed użyciem oczyścić skórę, np. roztworem soli fizjologicznej i dobrze wysuszyć
2. Nałożyć cienką warstwę żelu na zmienione miejsce
3. Nie wmasowywać
4. Pozostawić do samodzielnego wyschnięcia
5. Czynność powtórzyć dwa razy dziennie

OSTRZEŻENIA

- Nie stosować produktu w innym wskazaniu niż podane w ulotce informacyjnej
- Umyć ręce przed zastosowaniem produktu
- Po zastosowaniu nie masować zmienionego miejsca i pozostawić wyrób medyczny do naturalnego wyschnięcia; żel musi utworzyć ochronną cienką błonę

- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu niezwłocznie przemyć oczy wodą.
- Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu
- Przechowywać w temperaturze pokojowej i trzymać z dala od źródeł ciepła
- Nie zamrażać
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Do użytku zewnętrznego – nie spożywać
- Nie stosować w przypadku, gdy oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte
- Po użyciu zamknąć tubkę
- Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na składniki
- Przerwać stosowanie w przypadku obecności nieprawidłowych reakcji skórnych
- W przypadku długotrwałego stosowania skontaktować się z lekarzem

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania.

Nadwrażliwość na składniki produktu.

Nie stwierdzono przypadków interakcji z lekami i substancjami medycznymi.

WARUNKI PRZECIHOBYWANIA

Przechowywać z dala od źródeł wilgoci i ciepła.

W przypadku ekspozycji na światło słoneczne, produkt może przybrać lekko żółtawy kolor; nie wpłynie to na jego funkcjonalność ani trwałość.

Opakowanie 50 ml

Wyrób medyczny **CE 0477**



Wytwórca: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor: HEXANOVA Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki

LFTIA03401

Data aktualizacji: 07/2021