

Kaniuła dotętnicza BD™

z zaworem odcinającym BD Floswitch™



BD

Helping all people
live healthy lives

System dostępu naczyniowego do
inwazyjnego pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi oraz do pobierania
próbek krwi tętniczej.

Kaniula dotętnicza BD™

z zaworem odcinającym BD Floswitch™

Kaniula dotętnicza BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™ stanowi system dostępu naczyniowego do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w czasie rzeczywistym oraz do pobierania próbek krwi tętniczej. Kaniula dotętnicza jest wprowadzana przez bezpośrednie nakłucie tętnicy promieniowej. Technika zakładania jest porównywalna z zakładaniem kaniuli dożyłnej typu motylek do naczyń obwodowych.

Bezpośrednie nakłucie tętnicy promieniowej za pomocą kaniuli dotętnicznej BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™, w przeciwieństwie do metody Seldingera zapewnia ekonomiczny i ułatwiony dostęp do systemu naczyń tętniczych u znacznej większości pacjentów podczas zabiegów anestezjologicznych oraz u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Zbędne staje się czasochłonne i wymagające nakładu materiałowego przygotowanie miejsca nakłucia, co jest konieczne w przypadku metody Seldingera.

Dzięki kaniuli dotętnicznej BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™, nakłucie bezpośrednie stanowi standardową i bezpieczną metodę kaniulacji tętniczej, natomiast metoda Seldingera jest stosowana w głównej mierze w przypadku nakłuć trudnych.

Kaniula dotętnicza BD™ znajduje zastosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii, Oddziałach Pooperacyjnych, Kardiologicznych oraz Transplantologicznych - czyli wszędzie tam, gdzie możliwy i niezbędny jest stały monitoring inwazyjny ciśnienia tętniczego.

Właściwości produktu:

- zawór odcinający BD Floswitch™
- skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz „uszka” służące do przysycia kaniuli do skóry
- cewnik wykonany z PTFE
- sterylne pojedyncze opakowanie do jednorazowego użytku, bez lateksu, bez PVC

Zasada działania zaworu BD Floswitch™:

Kanalik z tworzywa sztucznego jest zaciskany przy użyciu stalowej kulki występującej w mechanizmie zaworu BD Floswitch™. Linie infuzyjne itp. otwierają się i zamykają w sposób prosty i bezpieczny.



Dane dot. zamówienia:

| Rozmiar | Średnica zewn. (mm) | Długość (mm) | Kod koloru | Nr produktu | VE / UK |
|--|---------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Kaniula dotętnicza BD™ z zaworem odcinającym BD Floswitch™ | | | | | |
| 20 G | 1,1 | 45 | czerwony | 682245 | 25 / 500 |



ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
tel. +48 42 677 14 11
www.skamex.com.pl



ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
tel. +48 22 377 11 00
www.bd.com/pl