



# SOL-M™ Igły Tępe

## SOL-M™ Igły Tępe z Filtrem



**Redukuje ryzyko zranień igłą** u pracowników ochrony zdrowia.

**Należy używać w celu pobrania leku** w połączeniu ze standardowymi strzykawkami z końcówką Luer Lock.

**Nasadka czerwona** – Igły Tępe



**Nasadka fioletowa** – Igły Tępe z Filtrem



**Łatwa identyfikacja** - nasadki w kolorze czerwonym i fioletowym.

Igły Tępe (BFN) - do pobierania preparatu z fiolek.

Igły Tępe z Filtrem (BFNF) - do pobierania preparatu ze szklanych ampułek.

**Filtr o grubości 5 mikronów** - zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do strzykawki w trakcie pobierania leku.

# SOL-M™ Igły Tępe

## SOL-M™ Igły Tępe z Filtrem



Przygotowywanie  
leków

### Instrukcja użycia


Wyciągnij Igłę Tępą z opakowania i połącz ją ze strzykawką.

Usuń nasadkę igły i pobierz lek.

**Igła Tępa** - Wbij igłę w środek gumowego korka pod kątem 90°. Pomoże to zredukować ryzyko zanieczyszczenia preparatu fragmentami gumy z fiolki.

**Igła Tępa z Filtrem** - Naciągnij preparat ze szklanej ampułki.

Gdy lek zostanie przygotowany i jest w strzykawce gotowy do podania, usuń Igłę Tępą / Igłę Tępą z Filtrem i wyrzuć do pojemnika na zużyte igły.

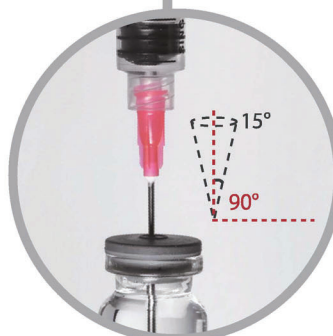

Igła Tępa przeznaczona jest **do użytku jednorazowego**. Ponowne użycie stępi igłę, zniknie silikonowe pokrycie i wzrośnie ryzyko odrywania się gumowych cząstek od korka.



### Specyfikacja produktu

Numer referencyjny	Nazwa produktu	Średnica igły (G)	Średnica igły (mm)	Długość igły	
				(mm)	(cale)
110023	SOL-M™ Igła Tępa 18G*2	18G	1.2 mm	50 mm	2"
110023F	SOL-M™ Igła Tępa z Filtrem 18G*2	18G	1.2 mm	50 mm	2"
110022	SOL-M™ Igła Tępa 18G*1 1/2	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"
110022F	SOL-M™ SOL-M™ Igła Tępa z Filtrem 18G*1 1/2	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"
110021	SOL-M™ Igła Tępa 18G*1	18G	1.2 mm	25mm	1"

#### Uwaga:

• Tolerancja długości igieł zgodna z ISO 7864 (wymiar w milimetrach)

Nominalna długość igły	< 25	25 do 39	40
Tolerancja	+1 / -2	+1.5 / -2.5	0 / -4

Ilość: 100/Pudelko; 1000/Opakowanie zbiorcze